

Excel® 
cryo™
 cooling system

1. Entfernen Sie den Excel Cryo Kühlkragen und das Excel Cryo Kühlelement aus der Verpackung.



2.

Liegt der Patient auf dem Rücken, dann schieben Sie den hinteren Teil des Kragens unter den Hals des Patienten. Platzieren Sie das Kinn des Patienten sicher in der Kinnhalterung (Neutralposition). Der untere Teil des Kragens liegt tiefer auf dem Sternum auf als andere Immobilisationskragen.



3.

Liegt der Patient nicht auf dem Rücken, dann schieben Sie die Vorderseite des Kragens entlang der Brust.



4.

Halten Sie die Vorderseite des Kragens fest und führen Sie die Rückseite des Kragens hinter dem Hals und dem Kopf des Patienten hindurch. Befestigen Sie die Rückseite mit Hilfe des Klettverschlusses an der Vorderseite.



5.

Aktivieren Sie das Excel Cryo Kühlelement

Halten Sie das Element aufrecht, so dass das Wasserkissen auf den Boden des Beutels fällt. Benutzen Sie die Daumen, um das Wasserkissen im Kühlelement zu finden und drücken Sie es kräftig zusammen bis es platzt.



6.

Schütteln Sie das Excel Cryo Kühlelement für ca. 5 Sekunden oder bis sich alle aktiven Substanzen aufgelöst haben. Das Kühlelement wird umgehend beginnen zu kühlen.

7.



Öffnen Sie die Klappe des Kragens und führen Sie ein Ende des Excel Cryo Kühlelements in die vordere Öffnung ein, schieben es entlang der rechten Seite des Halses des Patienten und stecken dann die andere Seite des Elementes an der linken Halsseite ein. Sobald das Kühlelement in der vorderen Öffnung untergebracht ist, schliessen Sie die Klappe. Passen Sie die Spannung der Klappe mit Hilfe des Klettverschlusses an. Stellen Sie sicher, dass das Excel Cryo Kühlelement Kontakt mit der Haut des Patienten hat, aber ohne unnötigen Druck.

8.



Alle 20 Minuten öffnen Sie die Klappe, entfernen Sie das Kühlelement und wiederholen Sie die Schritte 7 und 8.

WICHTIG

Verwenden Sie das Excel Cryo Cooling System entsprechend Ihrer lokalen Protokolle and Leitlinien.

Der Excel Cryo Kühlkragen ist ein Medizinprodukt zur Immobilisation der Halswirbelsäule und ist nur für die Anwendung durch geschultes Fachpersonal vorgesehen.

Diese Anweisungen sind als Richtlinie zu verstehen und nicht als Definition einer ärztlichen/medizinischen Tätigkeit.

Ein Immobilisationskragen ist nur ein Teil einer kompletten Immobilisation eines Patienten.

Die korrekte Anlage eines Immobilisationskragens erfordert zwei medizinisch geschulte Anwender.

Sichern Sie eine neutrale Kopf- und Halslage während der gesamten Anwendung, um weitere Schäden an der Halswirbelsäule oder dem Rückenmark zu verhindern.

Sorgen Sie für eine weitere Immobilisation von Kopf und Hals mit entsprechenden Hilfsmitteln und sichern Sie den Patienten auf Spineboard/Schaukeltrage/Krankentrage mit geeigneten Gurten.

Entsorgen Sie das Produkt nach dem Gebrauch, um ein Infektionsrisiko, unzureichende Immobilisation und/oder unzureichende Kühlung zu verhindern.



9100 S. Hills Blvd., Suite 220
Cleveland, OH 44147
info@CryothermicSystems.com
www.CryothermicSystems.com
Toll-Free 1-877-528-2888

Improving life through innovation™